



Einsatzbereiche

Therapie	Rehabilitation
Entlastung nach Operationen	Hüft-Dysplasie
adipöse Hunde	Cauda-Equina-Syndrom (DLSS)
vorrübergehende Lähmung	Dackellähmung
Bandscheibenvorfall	Lähmungen (z. B. Überköten)
kraftlose Hinterhand	Altersschwäche
	Durchtrittigkeit
	Spondylose (knöchernerne Zubildung an der Wirbelsäule)
	neurologische Probleme

Anwendung und Tragedauer

Legen Sie die beidseitig geöffnete Hebe- und Gehhilfe so auf den Rücken Ihres Tieres, dass das Logo von hinten lesbar ist. Führen Sie den rechten Gurt von außen am Bauch um das rechte Hinterbein herum und rechts neben der Rute wieder zurück auf den Rücken.

Verschließen Sie die flexible Schnalle und stellen den Gurt einmalig so ein, dass er glatt am Hinterbein anliegt. Das Gurtende können Sie im Neopren-Polster verwahren. Mit dem linken Gurt verfahren Sie entsprechend. Alternativ öffnen Sie nur eine Schnalle und führen das entsprechende Bein durch die geschlossene Schlaufe, sodass dann die Hebe- und Gehhilfe auf dem Rücken aufliegt. Anschließend führen Sie das geöffnete Band um den anderen Hinterlauf herum und verschließen die Schnalle. Stellen Sie nun die entsprechende Gurtlänge einmalig ein.

Der zusätzliche Heberiemens kann durch das Rückenteil auf der Höhe des Logos gezogen werden, so können Sie die Länge der Hebehilfe Ihrer Größe entsprechend anpassen.

Material

Band: 100 % Perlon, Polster: 100 % Neopren

Pflege



Bei Fragen oder Unklarheiten melden Sie sich bei uns – wir helfen Ihnen gerne weiter!

Service Hotline: 0049 8141 6106-8832 (Mo – Do: 08:00 – 16:00 Uhr | Fr: 08:00 – 13:00 Uhr)



HerzensTier
Moosfeldstraße 10 · 82275 Emmering
www.herzentier.de · info@herzentier.de



Tierorthopädie · Tierversorgung

F. G. Streifeneder KG · Tierorthopädie · Tierversorgung
Moosfeldstraße 10 · 82275 Emmering
www.tierortho.de · info@tierortho.de