



Einsatzbereiche

Prävention	Therapie	Rehabilitation
Schutz der Sehnen und Bänder	Bänder- und Sehnenverletzungen	Durchtrittigkeit
Schutz vor äußeren Verletzungen	Ruptur	Instabilität
Stabilisierung	Zerrung	Hyperextension
Sport	Lahmheit	Hyperflexion
vorbeugend gegen Überlastung	Fixierung von Verbänden	Fehlbildung
	nach Operationen	Arthrose
		Lähmungen (z. B. Radialisparese)
		neurologische Probleme

Anwendung und Tragedauer

Die Bandage ist sowohl für den linken als auch für den rechten Vorderlauf geeignet. Sie kann, je nach Diagnose und Therapieverlauf, mit oder ohne Schienen getragen werden.

Richten Sie die Bandage so aus, dass der obere und untere Klettverschluss außen entlang nach hinten weisen, und legen Sie je nach Größe des Tieres die Bandage ca. 0,5 bis 1 cm oberhalb der Vorderpfote an, so dass das Karpalgelenk ungefähr mittig liegt. Schließen Sie alle drei Klettverschlüsse, indem Sie das mittlere Band lockerer umlegen und die entgegengesetzt laufenden äußeren Bänder hingegen mit mehr Zug verschließen. Je nach Beinumfang kann die Bandage etwas überlappen. Sollten Sie die Schienen verwenden, achten Sie bitte darauf, dass diese innen und außen jeweils seitlich am Vorderbein verlaufen. Sie können die Schienen gegebenenfalls individuell etwas anbiegen und so der Form des Karpalgelenks anpassen.

Nehmen Sie die Bandage in Ruhephasen ab, sodass immer wieder Luft an das Bein gelangt.

Material

Neopren-Bandage: 100 % Neopren, Band: 100 % Polyamid

Schaumstoff-Bandage: Außen 100 % Polyamid, Mitte: 100 % Polyurethan, Band: 100 % Polyamid

Pflege

Nach dem Benutzen lassen Sie die Bandage trocknen und klopfen ggf. Sand, Staub etc. aus.

Vor dem Waschen bitte die Klettverschlüsse verschließen und die Schienen entfernen.



Bei Fragen oder Unklarheiten melden Sie sich bei uns – wir helfen Ihnen gerne weiter!

Service Hotline: 0049 8141 6106-8832 (Mo – Do: 08:00 – 16:00 Uhr | Fr: 08:00 – 13:00 Uhr)



HerzensTier
Moosfeldstraße 10 · 82275 Emmering
www.herzenstier.de · info@herzenstier.de



Tierorthopädie · Tierversorgung

F. G. Streifeneder KG · Tierorthopädie · Tierversorgung
Moosfeldstraße 10 · 82275 Emmering
www.tierortho.de · info@tierortho.de