



## Einsatzbereiche

Therapie	Rehabilitation
Kreuzbandriss	Arthrose
Patella-Luxation	Instabilität
Schuladen-Effekt	
Bänderdehnung	

## Anwendung und Tragedauer

Bitte ziehen Sie die Bandage Ihrem Hund im Stehen an. Legen Sie die Bandage möglichst weit oben von vorne an den Hinterlauf. Dabei muss die Ausbuchtung genau auf dem Kniegelenkspalt liegen – beachten Sie dazu die Markierung an der Innenseite der Bandage. Schließen Sie nun den oberen Klettverschluss und legen den Bauchgurt unten am Bauch entlang über den Rücken zurück zur Bandage. Kletten Sie ihn auf der teils geöffneten Bandage so zu, dass bei kleinen Hunden ein Finger und bei großen Hunden zwei Finger Platz haben.

Verschließen Sie die restlichen Klettverschlüsse gleichmäßig von hinten nach vorne. Der hintere Teil der Bandage sollte den vorderen Teil je nach Größe 1 – 4 cm überlappen. Die Klettverschlüsse zeigen nach vorne Richtung Bauch. Beim Überprüfen der stabilen Passform korrigieren Sie ggf. den Zug der Klettverschlüsse von oben nach unten, sodass dabei die Klettbänder einzeln fixiert bleiben. Da die Bandage natürlich die Bewegung im Kniegelenk etwas einschränkt, muss Ihr Hund lernen, das Sprunggelenk mehr zu beugen und im Hüftgelenk die Bewegung auszugleichen, um nicht mit der Pfote zu schleifen. Üben Sie zunächst auf weichem Untergrund ohne Steine und Schotter.

Bitte verwenden Sie die Kniebandage nur in Bewegung und nehmen Sie sie in Ruhephasen ab.

## Material

Abhängig von Größe und Diagnose des Hundes, u.a. Fleece, Polyamid

## Pflege

Nach dem Benutzen lassen Sie die Bandage trocknen und klopfen ggf. Sand, Staub etc. aus. Vor dem Waschen bitte die Klettverschlüsse verschließen und die Schienen entfernen.



Bei Fragen oder Unklarheiten melden Sie sich bei uns – wir helfen Ihnen gerne weiter!

**Service Hotline: 0049 8141 6106-8832** (Mo – Do: 08:00 – 16:00 Uhr | Fr: 08:00 – 13:00 Uhr)



HerzenTier  
Moosfeldstraße 10 · 82275 Emmering  
www.herzenstier.de · info@herzenstier.de



Tierorthopädie · Tierversorgung

F. G. Streifeneder KG · Tierorthopädie · Tierversorgung  
Moosfeldstraße 10 · 82275 Emmering  
www.tierortho.de · info@tierortho.de