

Gebrauchsanleitung Kühl- und Wärmebandage

Einsatzbereiche zur Kälte-Behandlung

Prävention	Therapie
vorbeugend nach dem Training	bei akuten Schmerzen in den Gelenken
zur Vorbereitung der Mobilisation	nach dem Training
	bei Überlastung der Muskulatur
	im akuten Stadium von Entzündungen an Sehnen und Bändern
	Ruptur
	Wachstumsstörungen
	Schwellung
	Prellung
	Verstauchung
	nach Operationen

Einsatzbereiche zur Wärme-Behandlung

Prävention	Therapie
zur Vorbereitung auf Massagen	wohltuend bei Verspannungen
	schmerzlindernd bei Arthrose
	bei chronischen Entzündungen

Anwendung und Tragedauer

Positionieren Sie die Bandage an der gewünschten Körperstelle Ihres Tieres und verschließen die Klettbänder so, dass sie außen entlang nach hinten verlaufen. Ihr Tier sollte diese Bandage am besten in Ruhephasen und unter Beobachtung tragen. Für die richtige Temperierung beachten Sie bitte die Hinweise auf der Kälte-/Wärmekomresse.

Material

Außen: Fleece: 90 % Polyester, 10 % Polyurethan (Oeko-Text Standard 100 Zertifikat Nr. VNO15132577), Innen: 85 % Polyamid, 15 % Elastan, Band: 100 % Polyamid

Pflege

Vor dem Waschen bitte die Klettverschlüsse verschließen und die Kälte-/Wärmekomresse entfernen.



Bei Fragen oder Unklarheiten melden Sie sich bei uns – wir helfen Ihnen gerne weiter!

Service Hotline: 0049 8141 6106-8832 (Mo – Do: 08:00 – 16:00 Uhr | Fr: 08:00 – 13:00 Uhr)



HerzensTier
Moosfeldstraße 10 · 82275 Emmering
www.herzenstier.de · info@herzenstier.de



Tierorthopädie · Tierversorgung

F. G. Streifeneder KG · Tierorthopädie · Tierversorgung
Moosfeldstraße 10 · 82275 Emmering
www.tierortho.de · info@tierortho.de