



Einsatzbereiche

| Prävention | Therapie |
|------------|--------------------------------------|
| Schutz | Ohrtrandnekrose |
| | Ohrtrand-Dermatose |
| | Ohrenentzündung |
| | Verletzungen im Ohr- und Kopfbereich |

Anwendung und Tragedauer

Krempeln Sie den Ohrenschutz von einer offenen Seite zusammen und stülpen ihn so von der Schnauze aus über den Kopf, dass eines der Gummibänder im Nackenbereich hinter den Ohren liegt, und das andere oberhalb der Augen vor den Ohren. Mit dem zusätzlichen Klettverschluss können Sie verhindern, dass Ihr Hund den Ohrenschutz mit den Pfoten abstreift: Führen Sie dazu das Klettband durch das angebrachte Riemchen mit dem Logo und fixieren es am Halsband.

Nehmen Sie den Ohrenschutz gelegentlich ab, sodass immer wieder Luft an die betroffene Stelle gelangen kann. Bei akuten bakteriellen Entzündungen sollten Sie vor der Anwendung mit Ihrem behandelnden Tierarzt Rücksprache halten, da der Ohrenschutz eine leicht wärmende Wirkung haben kann.

Material

85 % Polyamid, 15 % Elasthan; Band: 100 % Polyamid

Pflege

Vor dem Waschen bitte die Klettverschlüsse verschließen.



Bei Fragen oder Unklarheiten melden Sie sich bei uns – wir helfen Ihnen gerne weiter!

Service Hotline: 0049 8141 6106-8832 (Mo – Do: 08:00 – 16:00 Uhr | Fr: 08:00 – 13:00 Uhr)



HerzensTier
Moosfeldstraße 10 · 82275 Emmering
www.herzenstier.de · info@herzenstier.de



Tierorthopädie · Tierversorgung

F. G. Streifeneder KG · Tierorthopädie · Tierversorgung
Moosfeldstraße 10 · 82275 Emmering
www.tierortho.de · info@tierortho.de