

Gebrauchsanleitung Pfotenschuh und Pfotenschutz

Einsatzbereiche

Prävention	Therapie	Rehabilitation
Schutz	Verletzungen	neurologische Probleme
Stabilität	Wundheilung	nach Amputation von Krallen, Zehen oder Ballen
	nach Operationen	Stabilität

Anwendung und Tragedauer

Schieben Sie den Pfotenschuh/Pfotenschutz mit einer leicht hin- und herdrehenden Bewegung auf die Pfote Ihres Tieres. Achten Sie dabei bitte auf die Krallen, insbesondere auf Wolfs- und Daumenkrallen. Verschließen Sie den Reißverschluss bzw. Klettverschluss so, dass der Pfotenschuh/Pfotenschutz stabil an der Pfote fixiert ist.

Material

Hauptbestandteile:

Pfotenschuh für draußen: Neopren; Pfotenschuh für drinnen: Fleece; Pfotenschutz: u.a. Cordura

Pflege

Die **Pfotenschuhe** bitte nur mit Feinwaschmittel oder Wollwaschmittel von Hand waschen. Nicht in die Waschmaschine, den Geschirrspüler oder den Trockner geben!



Den **Pfotenschutz** können Sie nach dem Verschließen der Klettverschlüsse bei 30 °C waschen.



Bei Fragen oder Unklarheiten melden Sie sich bei uns – wir helfen Ihnen gerne weiter!

Service Hotline: 0049 8141 6106-8832 (Mo – Do: 08:00 – 16:00 Uhr | Fr: 08:00 – 13:00 Uhr)



HerzensTier
Moosfeldstraße 10 · 82275 Emmering
www.herzenstier.de · info@herzenstier.de



F. G. Streifeneder KG · Tierorthopädie · Tierversorgung
Moosfeldstraße 10 · 82275 Emmering
www.tierortho.de · info@tierortho.de