



Einsatzbereiche

Therapie
Gangbildschulung
nach längerer Erkrankung mit Muskelatrophie
geschwächte Hinterläufe
neurologische Probleme
Bewegungsstörungen am Hinterlauf
nach Operationen

Anwendung und Tragedauer

Fixieren Sie die Bandagen um den linken und rechten Hinterlauf zwischen Pfote und Sprunggelenk, so dass die Klettbänder außen entlang nach hinten verlaufen und der D-Ring nach vorne weist. Dann binden Sie jeweils ein Gummiband am D-Ring fest, führen es nach vorne zum Brustgeschirr und befestigen es in entsprechender Länge, die für die Therapie nötig ist.

Verwenden Sie die Trainingsbandage nur unter Beobachtung bei Therapie- und Trainingseinheiten.

Material

100 % Neopren, Band: 100 % Polyamid, Gummiband: 68 % Polyester, 32 % Gummi

Pflege

Vor dem Waschen bitte die Klettverschlüsse verschließen.



Bei Fragen oder Unklarheiten melden Sie sich bei uns – wir helfen Ihnen gerne weiter!

Service Hotline: 0049 8141 6106-8832 (Mo – Do: 08:00 – 16:00 Uhr | Fr: 08:00 – 13:00 Uhr)



HerzensTier
Moosfeldstraße 10 · 82275 Emmering
www.herzenstier.de · info@herzenstier.de



Tierorthopädie · Tierversorgung

F. G. Streifeneder KG · Tierorthopädie · Tierversorgung
Moosfeldstraße 10 · 82275 Emmering
www.tierortho.de · info@tierortho.de